

COMPRENDRE mon résultat

► DÉTECTÉ

Le veau est porteur du virus de la BVD et très probablement IPI (si la boucle a été posée le jour de la naissance).

Il doit être isolé et éliminé le plus rapidement possible.

► NON DÉTECTÉ

Le résultat est négatif, pas de virus.

Le veau est garanti non-IPI et sa mère aussi.



► VIDE : absence de cartilage dans le trocart

L'analyse n'a pas pu être réalisée.

Un nouveau prélèvement par prise de sang doit être fait rapidement pour connaître le statut BVD du veau.

► ININTERPRÉTABLE

Un problème est survenu lors de l'analyse. Le laboratoire ne peut pas rendre de résultat.

Un nouveau prélèvement par prise de sang doit être réalisé rapidement pour connaître le statut BVD du veau.

CONTACTS

► BVD, maladie, intérêt du dépistage...



Meghan CUFFE

☎ 04.79.70.79.79

Mélanie BRUN

☎ 04.79.70.78.24

✉ contact@gdsdesavoie.fr

www.gdsdesavoie.fr

► Résultat d'analyse, facture...



☎ 04.50.45.82.56

✉ lidal@lidal74.fr

► Commande de boucles



☎ 04.57.08.70.25

☎ 04.50.88.18.40

✉ ipg@smb.chambagri.fr



LA
BOUCLE
BVD



les
bonnes
pratiques



Pose - Prélèvement - Envoi - Résultat

ASTUCES

de pose

▶ Boucler le jour de la naissance : pourquoi ?

S'il existe un délai entre la naissance et le bouclage du veau (et donc le prélèvement), il est possible que ce veau soit en contact avec le virus, transmis par un autre animal.

Dans ce cas, si le résultat d'analyse est positif, il existera un doute : mon veau est-il IPI ou simplement porteur transitoire ?

Seule une seconde analyse par prise de sang pourra alors confirmer le statut du veau.

En attendant, il faudra isoler le veau (contagieux) et attendre 4 à 6 semaines avant de le reprélever !


▶ ATTENTION à la position de la boucle sur la pince

qui peut entraîner un mauvais prélèvement et/ou une mauvaise pose (et casse de la boucle).




▶ VÉRIFIER la bonne tenue de la boucle

en réalisant une rotation inverse entre les deux pièces de la boucle.

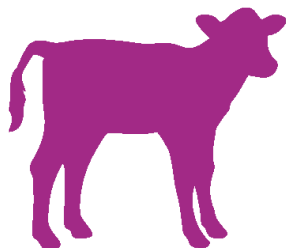

Retrouvez et imprimez la garantie non-IPI BVD d'un bovin en saisissant son numéro d'identification à 10 chiffres et sa date de naissance sur notre site internet frgdsra.fr/bvd-garantie-non-ipi.html

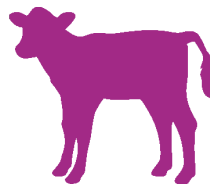

UN PRÉLÈVEMENT

de qualité

▶ VÉRIFIER que le prélèvement de cartilage est bien réalisé

Regarder dans le trocart :



Croix rouge visible
= absence d'échantillon



Opercule vert visible
= présence de l'échantillon

▶ Mon trocart est vide, que faire ?

Évitez d'envoyer un échantillon vide. L'analyse sera impossible mais le traitement de celui-ci sera facturé par le LIDAL.

Dans ce cas, un dépistage par prise de sang devra être réalisé pour connaître le statut BVD du veau.

Le nombre de prélèvement vide envoyé au laboratoire est en hausse ! Redoublez de vigilance au moment de la pose.

ENVOI

de l'échantillon

CLIPSER le tube avec le numéro correspondant à la boucle



NOTER la date de prélèvement sur l'étiquette correspondante à la boucle



GLISSER (et non coller) l'étiquette dans le sachet plastique avec le prélèvement

Penser à l'étiquette !



NE PAS DÉCLARER la naissance du veau (notification) à une date supérieure à la date de prélèvement



ENVOYER l'échantillon le plus rapidement possible après le prélèvement

Conservation 24h maximum au frigo

à savoir

Attention au délai trop long entre le prélèvement et l'envoi : le virus de la BVD étant peu résistant en milieu extérieur, le résultat peut-être faussé et qualifié de « faux-négatif ».