


Notice complémentaire boucle ULTRA Flex-TST (FR16)


A FAIRE / A PROSCRIRE



Attention, la position de la boucle dans la pince est primordiale

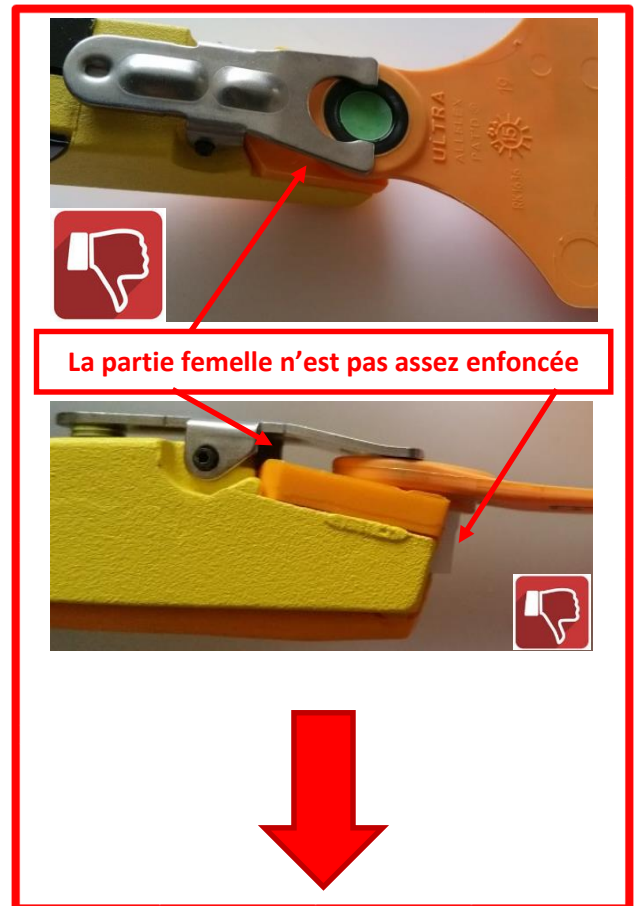

La partie femelle n'est pas assez enfoncée

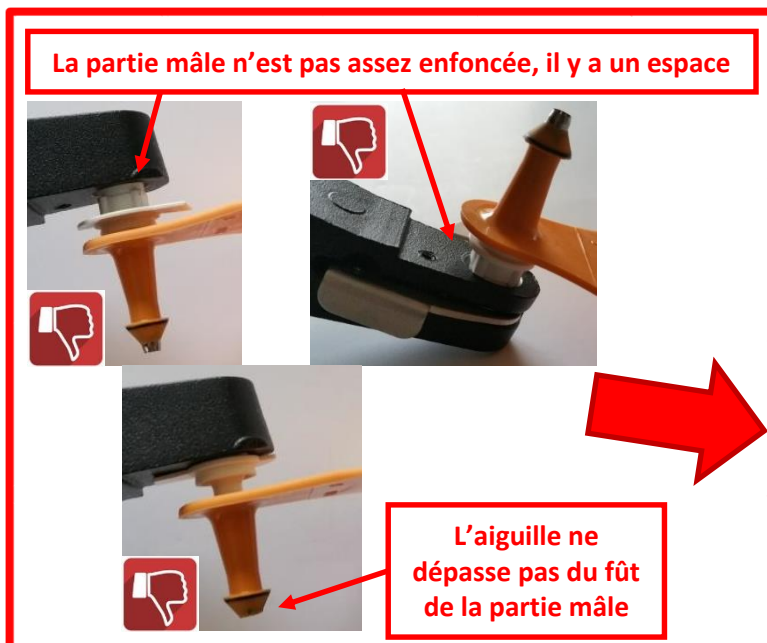

La partie mâle n'est pas assez enfoncée, il y a un espace

L'aiguille ne dépasse pas du fût de la partie mâle




**CASSE, TORSION, RECU de l'aiguille
=> MAUVAIS PRELEVEMENT
ou/et MAUVAISE POSE**

Notice complémentaire boucle ULTRA Flex-TST (FR16)

A FAIRE / A PROSCRIRE



Attention, ne pas endommager le capuchon vert

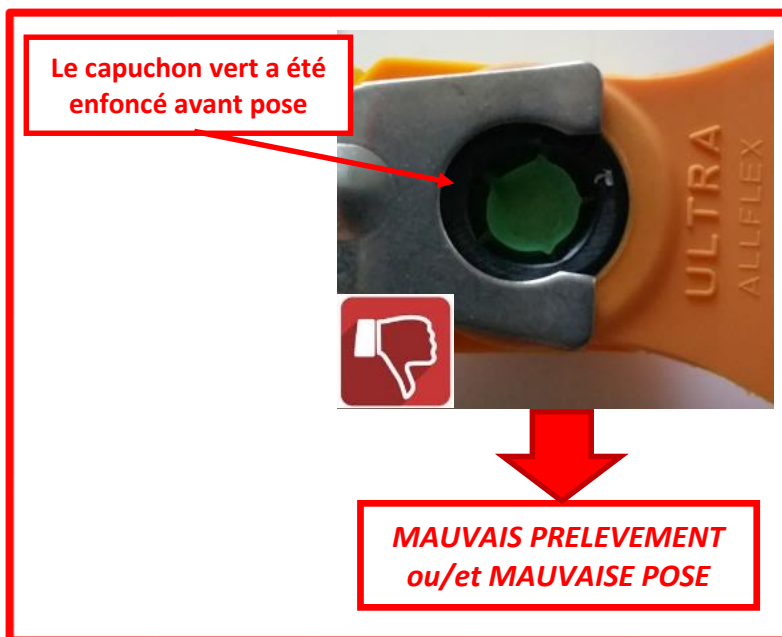

**Attention, la contention de l'animal est primordiale
L'animal ne doit pas bouger pendant le prélèvement et la pose**

Bloquez le veau, attachez-le, faites-vous aider, ...

